



DESCRIPCIÓN

La prueba rápida Anti-HCV IgG es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección cualitativa de anticuerpos de virus de la hepatitis C (VHC) en sangre entera, suero o plasma.

Es una prueba de **uso exclusivo en laboratorios clínicos y de gabinete**, los resultados reactivos deben ser confirmados mediante un método de referencia.



ALMACENAMIENTO

- La prueba se debe almacenar de 2-30 °C.
 - Sangre Entera:**
Las muestras de sangre entera deben ser usadas inmediatamente después de su recolección.
 - Suero o Plasma:**
Las muestras deberán ser refrigeradas si no son usadas el mismo día de su recolección y a partir del tercer día de no ser usadas deberán congelarse.
- Evite congelar y descongelar las muestras más de 2 o 3 veces antes de usarlas.



MATERIAL INCLUIDO

- 40 cassettes** en bolsas individuales de papel aluminio con un gotero de plástico y un desecante
- 4 diluyentes** de muestra (2 ml cada uno)
- Instructivo de uso**




**CORPORINTER
S.A. DE C.V.**

corporinter.com

PROCEDIMIENTO

Antes de realizar la prueba, el material y las muestras deben estar a temperatura ambiente.

- Saque el cassette de la bolsa de papel aluminio y colóquela sobre una superficie seca y limpia.
- Identifique el cassette para cada muestra o control.
- Agregue 30µl (**1 gota**) de muestra o de control en el pocillo redondo para. La muestra se añade al pozo "S". Espere **15 segundos** a que la muestra se absorba.
- Después agregue 60µl (**2 gotas**) de diluyente dentro del mismo pocillo redondo. El diluyente se añade en el pozo "D". (Revisar el inserto)
- El resultado de la prueba se lee de **15 a 20 minutos**. **No interprete los resultados antes o después del tiempo establecido.**

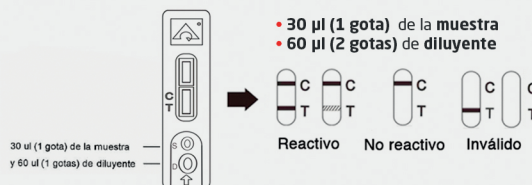

LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Los cassettes se pueden almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Si se refrigeran, los cassettes deben dejarse a temperatura ambiente antes de usarlos.
- Todos los resultados positivos se deben confirmar mediante un método alternativo.
- No utilice el material después de la fecha de caducidad.

Evaluación OMS

Sensibilidad **100%** Especificidad **99.7%**

ESTABLECIMIENTO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,
Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.