


# Safety Lancet-PAII

## Instrucciones de uso


### Principio y uso previsto:

Safety Lancet es para obtener muestras de sangre capilar para pruebas hospitalarias o monitoreo de glucosa en sangre


### Instrucciones:

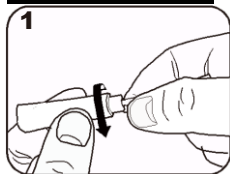

Desenrosque la tapa protectora.

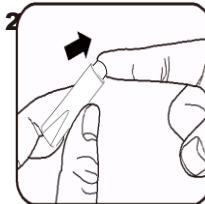

Sostenga la lanceta de seguridad contra la yema del dedo del paciente y presione suavemente para extraer sangre..

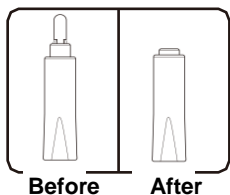

Distinción visual obvia antes y después del uso.

### Procedimiento de operación:

- \*Limpie la yema del dedo con una gasa con alcohol y deje que la piel se seque al aire durante unos 10 segundos
- \*Utilice la lanceta de seguridad inmediatamente después de abrir el paquete primario.
- \*Siga las instrucciones de 3 pasos anteriores para usar la lanceta de seguridad para extraer sangre.
- \*Deseche cualquier lanceta de seguridad usada en un contenedor de residuos adecuado.
- \*Nota: el tiempo de caducidad es de 5 años y el uso del producto más allá del vencimiento está estrictamente prohibido.

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co.,Ltd  
Domicilio: No.1, Shuangshan Sanjian Road, Zhangqiu, Jinan city, Shandong, China



Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe)  
Domicilio: Eiffestrasse 80, 20537. Hamburg, Germany  
Tel: 0049-40-2513175 Fax:0049-40-255726



0123